

Lietošanas instrukcija - lūdzu, rūpīgi izlasiet

ECTOgard

 medicīniska ierīce

Ectoin® 2% deguna aerosols alerģijas ārstēšanai



Pirms sākat lietot ECTOGARD, rūpīgi izlasiet šo informāciju. NEIZMETIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! Tā satur svarīgu informāciju. Ja jums ir kādi jautājumi par ECTOGARD, lūdzu, uzdodiet tos ārstniecības personai, farmaceitam



1. Kas ir ECTOGARD un kādam nolūkam to lieto

ECTOgard ir deguna aerosols tipisku alerģiska rinīta simptomu ārstēšanai un profilaksei (piemēram, iesnas, nieze, šķaudīšana un aizlikts deguns).

ECTOgard ir medicīniska ierīce, kas satur Ectoin® - dabisku šūnu aizsargmolekulu, ar iekaisumu mazinošām un membrānu stabilizējošām īpašībām.

ECTOgard samazina alergēnu un gaisā esošo daļiņu kaitīgo ietekmi, piemērots arī profilaktiskai lietošanai.

Tas ir hipertensisks šķīdums, kas dabīgi atbrīvo degunu no aizlikuma.

Tas veicina alergēnu izraisītu deguna gļotādas kairinājuma reģenerācijas procesu.

ECTOgard mazina alergēnu izraisītu deguna gļotādas iekaisumu.

Tas mazina tādus alerģiskus simptomus kā iesnas, deguna nieze un aizliktu degunu.

Klīniski pierādīta efektivitāte.

ECTOgard nesatur konservantus un ir piemērots jutīgiem degumiem.

ECTOgard nerada pieradumu un to var lietot līdz 30 dienām.

2. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- ECTOgard nedrīkst lietot, ja Jums ir paaugstināta jutība pret Ectoin® vai kādu citu deguna aerosola sastāvdaļu.
- Ja rodas alerģiskas reakcijas, ECTOGARD lietošana nekavējoties jāpārtrauc.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai caurdurta.
- Lai nodrošinātu drošu higiēnu, katru deguna aerosola pudelīti drīkst lietot tikai viena persona.
- Nelietot ilgāk par 3 mēnešiem pēc atvēršanas.
- ECTOgard jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

3. Kas jums jāzina pirms ECTOGARD lietošanas

Nav pieejami dati par ECTOGARD un citu lokāli lietojamu deguna līdzekļu mijiedarbību.

4. Kā lietot ECTOGARD

Vienmēr lietojiet ECTOGARD saskaņā ar šiem lietošanas norādījumiem.

Ja veselības aprūpes sniedzējs nav noteicis citādi, lietojiet 1–2 izsmidzinājumus katrā nāsī vairākas reizes dienā.

ECTOgard ir piemērots pat bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, ja tiek lietots ne vairāk kā 10 reizes (2 izsmidzinājumi vienā nāsī) dienā. Cilvēkiem no 2 gadu vecuma, nav devu ierobežojumu.

Nelietojiet ECTOGARD nepārtraukti ilgāk par 30 dienām.

Pirms ECTOGARD lietošanas pirmo reizi ja ir traucēta izsmidzināšanas funkcija, noņemiet vāciņu un 2–3 reizes sūknējiet pudeli vertikālā stāvoklī, lai no sūkņa izplūstu gaiss. Nenogrieziet galu.

1. Viegli izšņauciet degunu, lai attīrītu nāsis.

2. Noņemiet vāciņu no pudeles.

3. Turiet pudeli ar rādītājpirkstu un vidējo pirkstu abās pirkstu balstu pusēs un ar īkšķi zem pudeles. Nedaudz nolieciet galvu uz priekšu un aizveriet vienu nāsi, ar pirkstu viegli piespiežot uz deguna sāna.

4. Ievietojiet aerosola smidzināšanas sprauslu nāsī. Ātri un spēcīgi nospiežot sūkni, viegli ieelpojiet caur degunu.

5. Ievietojiet smidzināšanas sprauslu otrā nāsī.

6. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības otrai nāsij.

7. Noslaukiet pudeles galu ar tīru, bezšķiedru drāniņu.

8. Uzlieciet pudeles vāciņu.

5. Iespējamās ECTOGARD blakusparādības

ECTOgard ir laba panesamība. Līdz šim nav zināmas regulāri sastopamas vai ilgstošas blakusparādības. Ja Jūs novērojat

blakusparādības, kas saistītas ar ECTOGARD lietošanu, lūdzu, informējiet savu veselības aprūpes sniedzēju, farmaceitu. Ja stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās, sazinieties ar savu veselības aprūpes sniedzēju vai farmaceitu.

6. Kā uzglabāt ECTOGARD

ECTOgard derīguma termiņš ir norādīts uz iepakojuma un pudeles.

ECTOgard nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām.

ECTOgard jāuzglabā temperatūrā no 2 C–25°C

7. Papildu informācija

Ja ECTOGARD lieto kā paredzēts, nav pierādījumu par īpašu risku grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā.

ECTOgard ir piemērots bērniem.

Bērniem līdz 10 gadu vecumam un, pacientiem, kuri paši nespēj lietot ECTOGARD, jāsniedz palīdzība ECTOGARD lietošanas laikā.

8. ECTOGARD saturs

20 ml šķīduma

Viens izsmidzinājums satur 0,14 ml šķīduma

Sastāvdaļas

Ectoin®, jūras sāls, ūdens un fosfātu buferšķīdums

9.



Ražotājs

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Vācija

Izplatītājs

Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38, 1106 Budapest, Ungārija

Par jebkuriem neparedzētiem notikumiem vai blakusparādībām, kas saistītas ar produktu, lūdzu, sazinieties izmantojot adresi: help@egis.hu



10. Informācijas sagatavošanas datums: 03.2025

	CE marķējums
	Ražotājs
	Lūdzu, ievērojiet lietošanas norādījumus
	vienam pacientam-vairākkārtēja lietošana
	Sērijas numurs
	Derīguma termiņš (derīguma termiņš)
	Temperatūras ierobežojums
	Lūdzu, neizmantojiet bojātu vai caurdurtu iepakojumu